

Das neue GC Tooth Mousse enthält Recaldent™*, eine CPP-ACP-Formel (Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate) mit frei verfügbarem Kalzium und Phosphat. Das wohlschmeckende GC Tooth Mousse schützt den Zahnschmelz und gleicht auf einzigartige Weise den natürlichen Säurehaushalt im Mund aus. Und das in fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen.

GC Tooth Mousse. Stärkt. Schützt. Pflegt.
Erhältlich nur in Zahnarztpraxen!



Neu: Die erfolgreiche biologische Formel!

GC Tooth Mousse – Three-in-One:
Der natürliche Zahnschutz für Sie!

Stärkt den Zahnschmelz.

- Vor und nach dem Bleichen

Schützt das Dentin.

- Bei empfindlichen Zahnhälsen
- Nach der professionellen Zahnreinigung
- Bei orthodontischen Behandlungen

Pflegt den Zahn.

- Unterstützt den natürlichen Speichelfluss



* CPP-ACP wurde von The School of Dental Science an der University of Melbourne Victoria/Australien entwickelt. Recaldent™ ist ein eingetragenes Warenzeichen unter Lizenz der Fa. Recaldent Pty. Ltd.

'GC'
FIRST IS QUALITY

GC GERMANY GmbH · Paul-Gerhardt-Allee 50 · D - 81245 München
Tel. +49.89.89.66.74.0 · Fax +49.89.89.66.74.29
E-mail: info@germany.gceurope.com · www.germany.gceurope.com
GC EUROPE N.V. · Austrian Office · Tallak 124 · A - 8103 Rein bei Graz
Tel. +43.3124.54020 · Fax +43.3124.54020.40
E-mail: info@austria.gceurope.com · www.austria.gceurope.com
GC EUROPE N.V. · Swiss Office · Wilerstrasse 3 · CH - 9545 Wängi
Tel. +41.52.366.46.46 · Fax +41.52.366.46.26
E-mail: info@switzerland.gceurope.com · www.switzerland.gceurope.com
GC EUROPE N.V. · Head Office · Interleuvenlaan 13 · B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50 · Fax +32.16.40.02.14
E-mail: info@gceurope.com · www.gceurope.com



**Die neuartige
Zahnschutzcreme –
der Extra-Schutz
für Ihre Zähne!**

**GC Tooth Mousse.
Stärkt. Schützt. Pflegt.**

'GC'
FIRST IS QUALITY

Neu: Eine Zahnschutzcreme, die für optimalen Rundumschutz sorgt:

Aktiver Kariesschutz der neuen Generation – speichelanregend, den natürlichen Säurehaushalt verstärkend und einfach lecker. Mit dem neuen GC Tooth Mousse lässt sich die notwendige mineralische Balance im Mund in wenigen Minuten wieder herstellen. Ob z.B. bei empfindlichen Zahnhälsen, nach der professionellen Zahnreinigung und dem Bleachen oder bei Speichelproblemen: dank des revolutionären Wirkstoffs Recaldent™*, ist GC Tooth Mousse ideal geeignet für den maximalen Rundumschutz Ihrer Zähne! Und: diese neuartige Creme basiert auf Milchproteinen, einer rein biologischen Formel und ist gut verträglich.

Was ist GC Tooth Mousse?

GC Tooth Mousse ist das erste natürliche Schutzsystem gegen „Säureangriffe“. Es spült Bakterien und Essensreste von den Zähnen, fungiert als „Schmiermittel“ gegen die Zahnschmelzabtragung und seine Substanzen verhelfen zu einer pH-neutralen Umgebung. Der angeregte Speichelfluss fördert die Produktion von verloren gegangenen Kalzium- und Phosphationen, die zum Erhalt des oralen Gleichgewichts beitragen und so auch der Karies vorbeugen.**



Wann sollte GC Tooth Mousse verwendet werden?

Kosmetische Zahnmedizin

Unmittelbar nach dem Bleachen und der professionellen Zahnreinigung sowie nach der zahnärztlichen Fluoridisierung.

Speichelprobleme

GC Tooth Mousse fördert die Speichelproduktion z.B. bei Patienten mit Xerostomie***, dem geringen Speichelfluss oder der Mundtrockenheit.

Empfindliche Zähne

GC Tooth Mousse bietet den notwendigen Schutz für Ihre angegriffenen Zahnhälsen und verhindert schmerzempfindliche Zähne.

Kinderzahnheilkunde

Der Zahnschmelz von Kinderzähnen wird durch GC Tooth Mousse gestärkt und schlechte Mundhygiene, die zu Karies führen kann, wird durch die natürliche und gesunde Speichelproduktion ausgeglichen. Ganz besonders bei kieferorthopädischen Behandlungen mit eingeschränkter Mundhygiene.

Präventive Zahnmedizin

Unser Zahnschmelz, die wichtigste Substanz des Zahnes, schützt vor Schmerzen und wird täglich angegriffen. GC Tooth Mousse stärkt den Zahnschmelz und bietet somit einen Extra-Schutz.

Zahnschutz, den man schmeckt. Und so geht's:

Die neue biologische Formel Recaldent™* eignet sich für alle Patienten – von Kindern bis hin zu Senioren. Die Anwendungsart ist dabei ganz einfach: GC Tooth Mousse wird einfach mit einem Tupfer oder aber dem Finger auf der Zahnoberfläche verteilt und für zwei bis fünf Minuten in der Mundhöhle belassen. Je länger

GC Tooth Mousse im Mund bleibt, desto nachhaltiger ist der Behandlungserfolg. GC Tooth Mousse wird nach der Anwendung einfach und ganz natürlich mit dem Speichel herunter geschluckt. Einzige Ausnahme hierbei bilden Patienten mit einer Allergie auf Milchproteine.

Extra-Schutz für Ihre Zähne: Gesunde Zähne für ein natürliches Lachen.

Ihre Zähne sollten es Ihnen Wert sein: Mit GC Tooth Mousse haben Sie das richtige Rundumschutzsystem für Ihren Mund und ihre Zähne.



Empfindliche Zahnhälsen: Genießen Sie wieder Heißes, Kaltes, Süßes und Saures!

GC Tooth Mousse sorgt auf biologische Art und Weise dafür, dass Ihre Zähne unempfindlicher für äußere Einflüsse werden.



Natürliche und gesunde Speichelproduktion:

Ihr Mund kann an Trockenheit und einer Speichelunterfunktion leiden. GC Tooth Mousse regt auf natürliche Art Ihre Speichelfunktion an.



* CPP-ACP wurde von The School of Dental Science an der University of Melbourne Victoria/Australien entwickelt. Recaldent™ ist ein eingetragenes Warenzeichen unter Lizenz der Fa. Recaldent Pty. Ltd.

** Quelle: Anticariogenic casein phosphopeptides, Prof. E. C. Reynolds, School of Dental Science, The University of Melbourne

*** Quelle: Zahnärztliche Mitteilungen 95, Nr. 2, 16. 01. 2005, (151)



Die 40g Tube ist in den Geschmacksrichtungen Minze, Erdbeere, Melone, Tutti-Frutti und Vanille bei Ihrem Zahnarzt erhältlich.